



Instruction de service
pour les hottes aspirantes types : **DU1 et DU2**

1. Données techniques :

	DU1	DU2
Tension	230 V	230 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Puissance	120 W	280 W
Capacité	7 m ³ /min	14 m ³ /min
Poids	16 kg	25 kg

2. Montage et raccordement électrique

Il est recommandé de monter les hottes avec des vis de au moins 6 mm et des chevilles de 8 mm à un mur solide. Tourner l'ouverture d'échappement du moteur dans la direction correspondante avant le montage. Les hottes sont équipées d'un câble et fiche de contact pour le raccordement à une prise mise à terre.

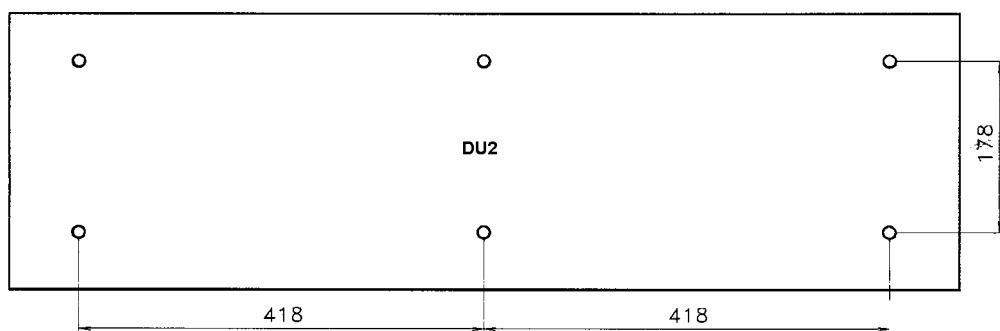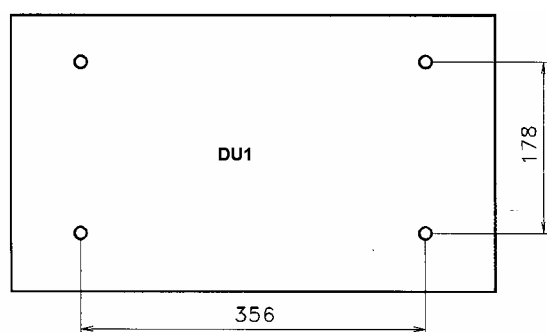

L'ouverture d'échappement peut être prolongée par des tuyaux en métal d'un diamètre de 100 mm. En aucun cas diminuer le diamètre ! Afin de garantir une fonction impeccable de la hotte, il faut toujours maintenir le tuyau propre.

La capacité d'aspiration est réglée par le commutateur rotatif installé. La puissance est mise au maximum, en tournant le commutateur la puissance se diminue.


3. Raccordement à un four

Pour l'opération automatique la hotte peut être raccordée à un four MIHM-VOGT par la prise à l'arrière du four. Pour programmer l'opération veuillez voir les instructions de service correspondantes du four.

Si l'opération automatique est désirée avec plusieurs fours, il faut installer un adaptateur entre fours et hotte (adaptateur type OA2 pour 2 fours, OA3 ou OA4 pour 3 ou 4 fours).

4. Ajuster la direction d'échappement

Le moteur est fixé par quatre vis à la hotte. Si la direction d'échappement est indiquée sur la commande, le moteur est installé à l'usine comme désiré. Pour ajuster la direction d'échappement desserrez les quatre vis et tournez le moteur dans la direction désirée. Puis remettez et serrez les vis dans les trous correspondants.

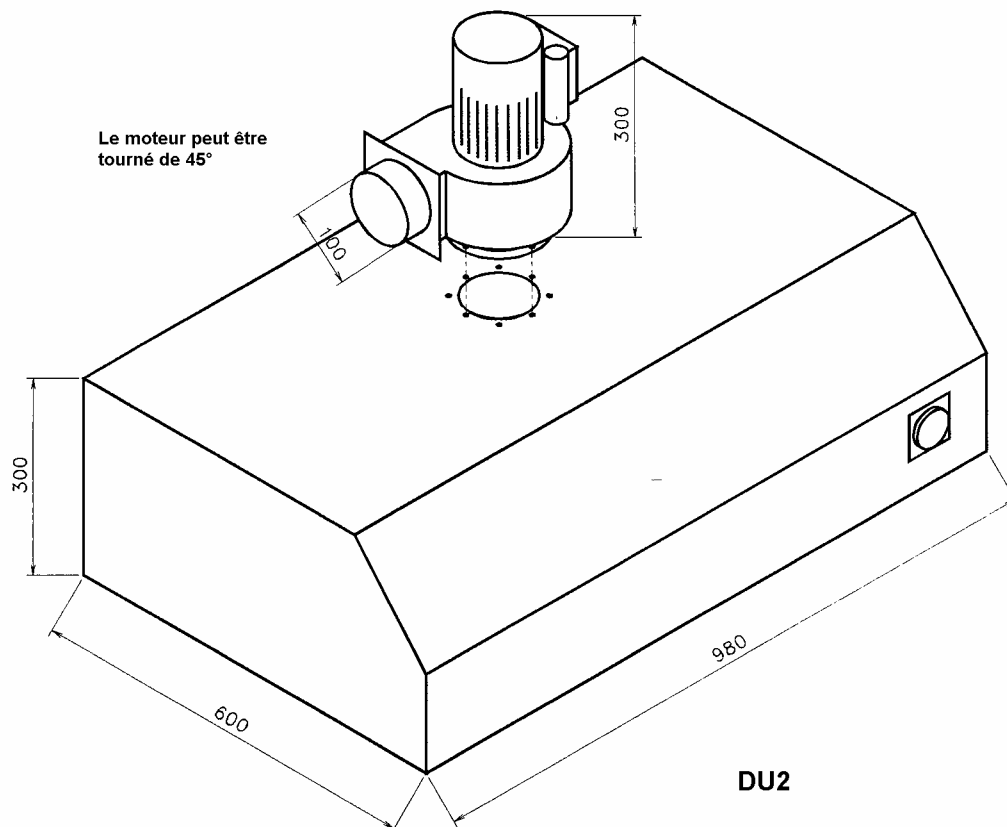

5. Maintenance

Il faut maintenir le moteur et l'ouverture d'échappement dans un état propre. Il n'y a pas d'autre maintenance spécial.

MIHM-VOGT GmbH & Co.

Dental-Gerätebau

Friedrich-List-Str. 8

D-76297 Stutensee

Tel. +49 7244 70871-0

Fax +49 7244 70871-20

www.mihm-vogt.de